

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszej usługi. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik, który ułatwi dalsze postępowanie. W celu prawidłowego pobrania krwi, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zestaw służy do samodzielnego pobrania materiału i składa się z:

1. Dokument: "Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego" – 2 sztuki.
2. Nakłuwacz ze sterylną igłą w środku – 2 sztuki.
3. Karta w formie bibuły do nakroplenia krwi – 1 sztuka.

**KROK I**

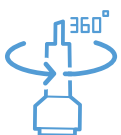
Wymij bibułę do nakroplenia materiału. We wskazanym miejscu wpisz drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, proszę wpisz swoją datę urodzenia: ROK-MIESIĄC-DZIEŃ.

**KROK II**

Przed wykonaniem badania umyj ręce ciepłą wodą i mydłem. Rozgrzanie dłoni poprawi Twój krwioobieg, co przyczyni się do zwiększenia kropli krwi.

**KROK III**

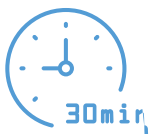
Usiądź w wygodnej pozycji. Połóż dłoń poniżej łokcia - pozwoli to na lepszy dopływ krwi do opuszki palca. Najlepszym miejscem nakłucia jest boczna opuszka palca - minimalizuje odczucie dyskomfortu.

**KROK IV**

Igła w nakłuwaczu jest sterylna. Usuń osłonę ostrza poprzez przekręcenie jej o 360 stopni. Przyłóż nakłuwacz do miejsca nakłucia, a następnie naciśnij przycisk nakłuwacza kciukiem, zdecydowanym ruchem. Aby uzyskać wymaganą ilość krwi, zastosuj przerywany nacisk na miejsce w pobliżu nakłucia.

**KROK V**

Naciskając na miejsce w pobliżu nakłucia, nakropi na wyznaczone miejsca w formie krążków krople krwi. Minimum 1-2 krążki powinny zostać całkowicie wypełnione. Pamiętaj, aby krew przesiąknęła na drugą stronę bibuły! Po pobraniu, miejsce nakłucia zabezpiecz materiałem opatrunkowym, lekko uciskając.

**KROK VI**

Kartę z plamami krwi susz w temperaturze pokojowej przez minimum 30 minut.

**KROK VII**

Zużyty nakłuwacz należy zutylizować.

**KROK VIII**

Kartę wraz z wypełnionymi podpisanymi dwoma kopiami dokumentu: "Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego" należy zapakować ponownie do opakowania oraz **wysłać niezwłocznie w ciągu 24h** na adres:

Centrum Medyczne MEDGEN: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 27.

W celu wysłania zestawu, prosimy skontaktuj się z firmą logistyczną pod numerem telefonu:

Firma logistyczna TNT: **22 771 71 71**

Wysyłka przesyłki na koszt CM MedGen.

**KROK IX**

Cierpliwie oczekuj wyniku swojego badania. Pamiętaj, że czas oczekiwania może sięgnąć 6 tygodni. Po otrzymaniu wyniku badania możliwe będzie umówienie bezpłatnej konsultacji wyniku ze specjalistą ENEL-MED (22 230 70 90).